

Χρήση

Το Wako NEFA Standard προορίζεται για χρήση με το αντιδραστήριο NEFA-HR(2) για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) στον ορό.

Αντιδραστήρια και περιεχόμενο

CAL: 2 x 10 ml.

Περιεχόμενο: Ολεϊκό οξύ, σταθεροποιητής

Προετοιμασία βαθμονομητή

Ο βαθμονομητής παραδίδεται έτοιμος προς χρήση.

Τιμές αναφοράς και ο προσδιορισμός τους

Τιμές αναφοράς: βλέπε ετικέτα φιάλης.

Ανιχνεύσιμο ως προς το εσωτερικό πρότυπο της Wako.

Συνθήκες φύλαξης

Φύλαξη σε 2–10 °C.

Ημερομηνία λήξης: βλέπε την ετικέτα των φιαλιδίων ή της συσκευασίας.

Προειδοποιήσεις και προστατευτικά μέτρα

- Μόνο για διαγνωστική χρήση *in-vitro*.
- Η εφαρμογή αυτής της δοκιμασίας επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Ισχύουν οι σχετικές εθνικές και τοπικές προδιαγραφές και νόμοι.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανθρώπου και ζώα *in-vivo*.
- Μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Ο βαθμονομητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό από αυτόν που αναφέρεται εδώ.
- Αυτό το προϊόν περιέχει αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί μαζί με χαλκό ή μόλυβδο να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα. Ακόμη και αν τα αντιδραστήρια περιέχουν μόνο μηδαμινές ποσότητες αζιδίου του νατρίου, να ξεπλυθούν οι αποχετεύσεις εντατικά με νερό, μετά την απόρριψη των αντιδραστηρίων.
- Εάν ο βαθμονομητής έλθει σε επαφή με το στόμα, τα μάτια ή το δέρμα, να ξεπλυθούν αμέσως με πολύ νερό. Εάν χρειαστεί συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
- Κατά τη διάθεση αυτού του προϊόντος να ακολουθείτε τις ανάλογες τοπικές και εθνικές προδιαγραφές.

Πληροφορίες για παραγγελία

Αρ. Παραγγελίας	Προϊόν	Συσκευασία
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml