

Utilisation

Le Wako LDL-C Calibrator doit être utilisé avec le réactif LDL-C L-Type Wako pour le dosage du cholestérol des lipoprotéines de faible densité (LDL-C) dans le sérum humain.

Réactifs et ingrédients

LDL-C Calibrator : 4 flacons x pour 1 mL.
Contient du sérum humain et stabilisateur.

Préparation des Réactifs

Reconstituer chaque flacon de calibrant avec 1 mL d'eau distillée ou deionisée. Les flacons du calibrant sont stables 7 jours entre 2–10 °C après reconstitution.

Valeur et déterminations

Valeurs : voir sur le flacon.
Détermination : basée sur la méthode de référence US CDC LDL-C.

Conservation

Conserver entre 2–10 °C.

Avertissements et précautions d'emploi

- Destiné à un usage *in Vitro*.
- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne pas utiliser les réactifs *In Vivo*.
- Éliminer les déchets selon les règles en vigueur.
- Ne pas utiliser les calibrants pour d'autres applications que celles décrites dans la notice.
- Du sérum humain est utilisé dans le processus de production de ce produit. Ce sérum humain a été testé et trouvé négatif à l'AgHbs, l'anticorps anti-HIV et l'anticorps anti-HCV. Ce réactif doit être utilisé avec les mêmes précautions qu'un échantillon potentiellement contaminé car aucun test ne certifie que ce produit n'est pas contaminé par un agent infectieux.
- Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur chaque flacon de calibrant.
- Ce coffret contient parmi ses constituants une substance classée comme suit selon le règlement (CE) n° 1272/2008.

Pictogrammes de danger



Attention

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)

Mentions de danger

- Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence

- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Présentation

Référence	Produit	Taille coffret
419-24032	LDL-C Calibrator	CAL : 4 x pour 1 mL