

Zamýšlené použití

Sérum pro kontrolu komplementu Wako je určeno pro použití jako kontrolní sérum pro kontrolu kvality v klinické laboratoři pro sledování přesnosti a přesnosti testování komplementu pomocí Sad pro automatické testování Wako Autokit CH50.

Reagencie a ingredience

Kontrola komplementu N: 10 lahvíček x pro 0,5 ml

Kontrola komplementu V: 10 lahvíček x pro 0,5 ml

Obsahuje lidské sérum.

Příprava reagencie

Přidejte přesně 0,5 ml destilované nebo deionizované vody, aby se rozpustil obsah každé z kontrol.

Skladování a stabilita

Kontrola komplementu Wako bude stabilní až do data expirace uvedeného na štítku lahvíčky, pokud se neotevře při teplotě -10 °C nebo nižší. Jakmile je Kontrola rekonstituována, ponechejte roztok na ledu po dobu nejméně 30 minut. Poté skladujte při teplotě 2–10 °C a spotřebujte do 8 hodin.

Omezení

Pokud se v rekonstituované Kontrolě nacházejí stopy mikrobiální kontaminace nebo nadměrného zákalu, lahvíčku zlikvidujte.

Přiřazení hodnot

Hodnoty a přijatelné rozsahy vytištěné na štítcích lahvíček byly odvozeny z opakovaných analýz a jsou specifické pro tuto šarži Kontroly komplementu Wako. Jelikož na výkon má vliv samotný přístroj, činidlo, techniku a variace metod, doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své vlastní hodnoty a přijatelné rozsahy. Hodnoty a přijatelné rozsahy uvedené na štítcích by měly být používány pouze jako orientační hodnoty.

Varování a bezpečnostní opatření

- Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.
- Pro profesionální použití.
- Nesmí se používat vnitřně u lidí a zvířat.
- Při výrobě tohoto produktu byl použit materiál lidského séra. Použité surové lidské sérum bylo testováno a bylo zjištěno negativní na HBsAg, anti-HIV protilátku a anti-HCV protilátku. Jelikož žádný test nemůže poskytnout úplnou jistotu, že produkty získané z lidské krve nebudou přenášet infekční agens, doporučuje se, aby se s tímto produktem zacházelo se stejnými bezpečnostními opatřeními pro biologické nebezpečí, jaké se běžně používají u vzorků pacientů.
- Při likvidaci reagentů postupujte v souladu s místními nebo národními předpisy.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

- Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Nebezpečné komponenty k etiketování

- Albumins, blood serum
- kyselina boritá (SVHC)

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS07



GHS08

Nebezpečí**Standardní věty o nebezpečnosti**

- Zdraví škodlivý při požití.
- Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

- Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
- Po manipulaci důkladně omyjte.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Informace k objednavce

Kód č.	Výrobek	Balení
991-43701	Kontrola komplementu	N: 10 x pro 0,5 ml (nizk.) V: 10 x pro 0,5 ml (vys.)