

HP 270-77000  
0624D1

### Formål

WAKO NEFA-standarden er designet til at blive brugt med WAKO NEFA-HR(2) reagens til kvantitativ bestemmelse af de frie fedtsyrer (FFA) i serum.

### Reagenser og ingredienser

KAL: 2 x 10 mL  
Indeholder: Oliesyre, stabilisator

### Reagensforberedelse

Denne standard leveres i flydende form.

### Tildelte værdier og deres bestemmelse

Tildelt værdi: Se flaskeetiket.  
Kan spores til intern Wako standard.

### Opbevaringsforhold

Opbevares ved 2–10 °C.  
Udløbsdato: Se flaskeetiketter eller pakke.

### Advarsler og forholdsregler

- Til in vitro-diagnostisk brug.
- Brug og anvendelse af denne test er kun forbeholdt professionel brug. Der henvises til de respektive nationale og lokale bestemmelser og lovgivning.
- Ikke til indvortes brug i mennesker eller dyr.
- Reagenser må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er trykt på flaskens etiket.
- Brug ikke kalibratoren til andre formål end de her beskrevne.
- Dette produkt indeholder stabilisatorer. Natriumazid kan reagere med både kobber- og blyrør og således danne eksplosive forbindelser. Selvom dette produkt indeholder små mængder natriumazid, skal afløb skylles godt med store mængder vand, når opløsningen bortskaffes.
- Hvis standarderne kommer i kontakt med mund, øje eller hud, skal de straks vaskes af med rigelige mængder vand. Kontakt om nødvendigt læge.
- Dette produkt skal bortskaffes i henhold til lokale eller nationale bestemmelser.

### Bestillingsoplysninger

| Kodenr.   | produkt       | pakke          |
|-----------|---------------|----------------|
| 270-77000 | NEFA standard | KAL: 2 x 10 mL |