

HP 270-77000
0624D1

Bedoeld gebruik

De Wako NEFA Standard is ontworpen voor gebruik met Wako NEFA-HR(2) reagens voor de kwantitatieve bepaling van vrije vetzuren (FFA) in serum.

Reagentia en ingrediënten

CAL: 2 x 10 ml
Bevat: oliezuur, stabilisator

Bereiding van reagens

De standaard wordt geleverd in vloeibare vorm.

Toegekende waarden en hun bepaling

Toegekende waarde: zie etiket op fles.
Traceerbaar volgens Wako interne standaard.

Opslagomstandigheden

Opslaan bij 2–10 °C.
Vervaldatum: zie etiket op fles of verpakking.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek.
- Het gebruik en de toepassing van deze test is voorbehouden aan professioneel gebruik. Raadpleeg de respectieve nationale en lokale wet- en regelgeving.
- Niet voor intern gebruik bij mensen of dieren.
- Gebruik het reagens niet na de vervaldatum die is aangegeven op het etiket van elke reagensfles.
- Gebruik de kalibrator niet voor andere doeleinden dan hierin beschreven.
- Dit product bevat stabilisatoren. Natriumazide kan reageren met koperen of loden leidingen en explosieve verbindingen vormen. Hoewel dit product minuscule hoeveelheden natriumazide bevat, moeten afvoeren goed worden gespoeld met een grote hoeveelheid water bij het afvoeren van de oplossing.
- Als de standaard in contact komt met de mond, ogen of huid, was direct af met een grote hoeveelheid water. Raadpleeg een arts indien nodig.
- Voer dit product af in overeenstemming met de lokale of nationale regelgeving.

Bestelinformatie

Codenr.	Product	Verpakking
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml