

Účel použití

Wako NEFA Standard při společném použití s činidlem NEFA-HR(2) slouží ke kvantitativnímu stanovení volných mastných kyselin (FFA) v séru.

Činidla a obsah

CAL: 2 x 10 ml.
Obsah: kyselina olejová, stabilizátor

Příprava kalibrátoru

Kalibrátor se dodává v takové podobě, kdy je připraven k okamžitému použití.

Předepsané hodnoty a jejich určení

Předepsané hodnoty: viz etiketa na lahvičce.
Návaznost přes interní standard Wako.

Podmínky skladování

Skladujte při 2–10 °C.
Datum spotřeby: uvedeno na etiketě lahvičky nebo balení.

Varování a preventivní bezpečnostní opatření

- Pouze pro diagnostiku *in vitro*.
- Tento test smí provádět pouze vyškolený odborný personál. Platí příslušné národní a místní předpisy a zákony.
- U lidí nebo zvířat se nesmí aplikovat způsobem *in vivo*.
- Po uplynutí trvanlivosti uvedené na obalu se činidla již nesmí dále používat.
- Kalibrátor se nesmí používat k jinému než zde popsanému účelu.
- Tento výrobek obsahuje azid sodný jako konzervační prostředek. Azid sodný může s mědí nebo olovem vytvářet výbušné směsi. I když činidla obsahují pouze minimální množství azidu sodného, přesto by se po likvidaci činidla měly odpady vypláchnout velkým množstvím vody.
- Pokud se kalibrátor dostane do úst, očí nebo přijde do kontaktu s pokožkou, ihned se postižené místo opláchně velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při likvidaci tohoto výrobku se postupuje v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Informações para encomenda

Objednací č.	Výrobek	Obsah
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml