

HP 270-77000  
0318D2

### Bruksformål

Wako NEFA standard skal brukes sammen med NEFA-HR(2)-reagens for kvantitativ bestemmelse av de frie fettsyrene (FFA) i serum.

### Reagensmiddel og innhold

CAL: 2 x 10 ml.  
Innhold: Oleinsyre, stabilisator

### Forberedelse av kalibrator

Kalibratoren leveres bruksferdig.

### Nominelle verdier og bestemmelsene

Nominelle verdier: se flaskens etikett.  
Sporbar til Wako - intern standard.

### Lagerbetingelser

Lagres ved 2–10 °C.

Utløpsdato: Se etikett på flaske eller eske.

### Advarsler og forholdsregler

- Kun for *in vitro* bestemmelser.
- Å bruke denne testen er kun tillatt for utdannede fagpersoner. De gyldige nasjonale og regionale forskriftene/lovene gjelder.
- Må ikke brukes *in vivo* på mennesker eller dyr.
- Reagensmidler må ikke brukes etter forfallsdatoen som er angitt på pakningen.
- Kalibratoren må ikke brukes til andre formål enn de som angis her.
- Dette produktet inneholder natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan danne eksplosive blandinger med kobber eller bly. Selv når reagensmidlene kun inneholder minimale mengder med natriumazid bør avløpene skylles grundig med vann når reagensmidlene deponeres.
- Hvis kalibrator kommer i kontakt med munn, øyner eller hud må en skylle øyeblikkelig med mye vann. Kontakt lege ved behov.
- Ved deponering av dette produktet må en følge de gyldige lokale eller nasjonale bestemmelsene.

### Bestillingsinformasjon

Best. nr.	Produkt	Innhold
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml